

LEVIGARO

L'attualità medica dal punto di vista del Suo laboratorio

Dr. med. Edouard H. Viollier, FMH in medicina interna
Dominic Viollier, lic. oec. HSG


Differenziazione dello striscio ematico: perfetta microscopia

Contesto

Accanto alla differenziazione in citometria a flusso, la valutazione microscopica del sangue fornisce importanti informazioni su alterazioni morfologiche e su numerose affezioni.

Standard



La perfezione della differenziazione microscopica ematologica inizia nel Suo studio medico con una preparazione accurata e standardizzata dello striscio ematico.

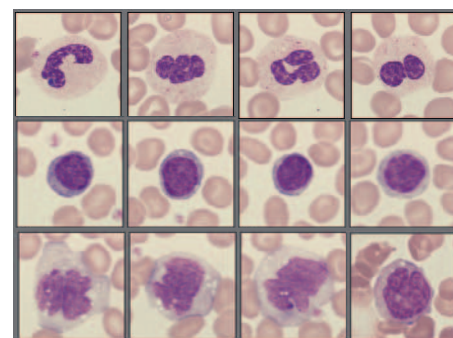

Premesse



- Striscio con sangue il più fresco possibile (sangue EDTA, venoso o capillare; entro 2h)
- Impiego di vetrini ottimizzati **con bordi smussati**
- Tecnica per una corretta esecuzione dello striscio

Tecnica di striscio

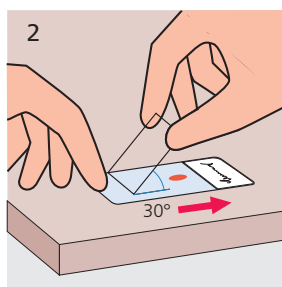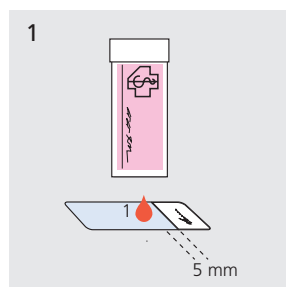

1 Applichi una goccia (ca. 5 μ L) di sangue sul vetrino portaoggetti ad una distanza di 5 mm dal bordo smerigliato.

2 Posizioni il vetrino Undritz con un'angolazione di 30° rispetto al vetrino portaoggetti e lo trascini fino alla goccia di sangue.

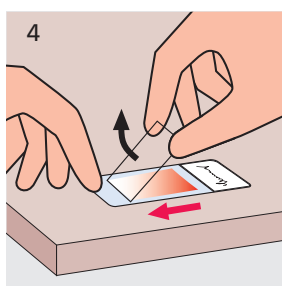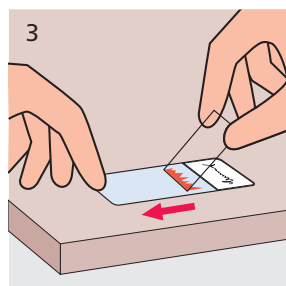

3 Attenda finché la goccia di sangue sia distribuita su tutta la larghezza del vetrino Undritz per capillarità.


4 Spinga il vetrino Undritz con l'angolazione di 30° fino a formare uno striscio su ca. 3/4 della superficie del vetrino portaoggetti. Lasci asciugare gli strisci 5 minuti prima di porli nella custodia di trasporto color lilla.

**Dettaglio
quale visione**

Microscopia assistita

La microscopia assistita da computer ci permette di trasmetterLe, in maniera più rapida e standardizzata, i risultati della differenziazione microscopica.

Materiale

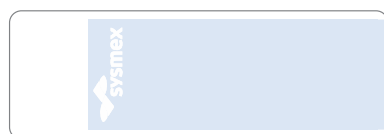

No. articolo 10343:

2 Portaoggetti **con angoli smussati** con custodia, lilla

Prezzo

Differenziazione dello striscio ematico CHF 26.–

Informazioni

Letteratura su richiesta
Dr. med. Maurice Redondo, FMH in ematologia FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile Ematologia
PD Dr. med. Boris E. Schleiffenbaum, FMH in ematologia FAMH in medicina di laboratorio, Medico consulente Ematologia
Dr. pharm. Saïd Marzouk, FAMH in medicina di laboratorio, Ematologia / Outer Corelab

Redazione Dr. med. Dieter Burki, FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile del settore Produzione Ovest
contact@viollier.ch | www.viollier.ch