


## Urin – Chemische Analysen: Spoturin

Spoturin-Tube ohne Konservierungsmittel (52) oder Spoturin-Tube mit Salzsäure (HCl) (53)

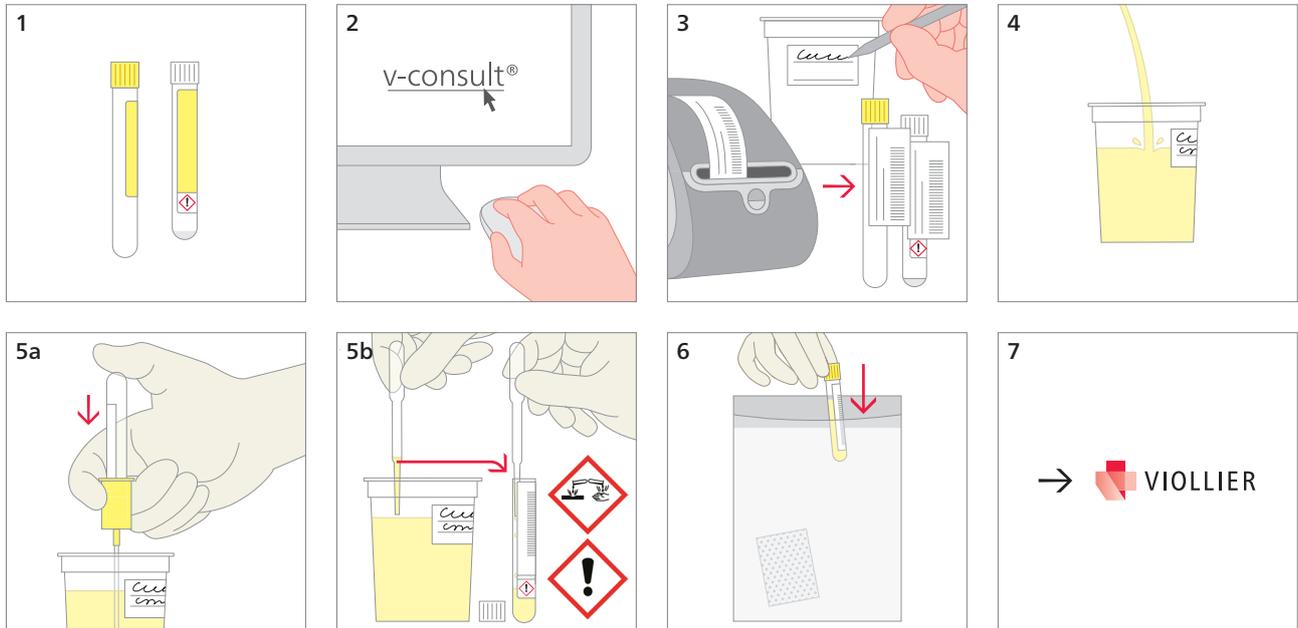

**1** Wahl des korrekten Spoturin-Tubes ohne Konservierungsmittel (52) oder mit Salzsäure (HCl) (53)

**5a** Spoturin-Tube ohne Konservierungsmittel (52) vollständig mit Urin auffüllen

**5b** Spoturin-Tube mit Salzsäure (HCl) (53) vollständig mit Urin auffüllen  
 Achtung: Salzsäure ist ätzend und kann Haut- und schwere Augenreizung verursachen!  
 Nicht mit den Schleimhäuten in Berührung bringen und von Kindern fernhalten  
 → Tox Info Suisse Notfallnummer 145 bei Kontakt / Verätzung mit Salzsäure

→ Anzahl und Typ der benötigten Urinsammelgefässe gemäss v-consult®

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften